



Rady k měření pro nákup invalidního vozíku

Než přistoupíte k samotnému měření vozíku, dobře si rozmyslete, zda opravdu vozík chcete. Vozíky vyrábíme na míru vašeho zvířátka a Vámi vrácený či nevyzvednutý vozík je pro nás velké zklamání.

Jak začít

Budete potřebovat metr, nejlépe krejčovský. Několik minut volného času – není dobré měřit ve spěchu, zvířátko z vás cítí nervozitu, nechce spolupracovat a vznikají nepříjemné pocity na obou stranách.

Mnoho lidí má obavy při měření velkých plemen – pejsek se neudrží sám a podpírání psa a přesné měření je

často náročné. Při měření větších plemen si nejlépe poradíte tak, že povoláte k sobě někoho na pomoc a když to nejde měření provedete v leže pejska.

Žádné centimetry nikde nepřidávejte, vozík pak nebude pejskovi či kočičce sedět tak jak má.

Měření by mělo probíhat v klidu a přátelské atmosféře. Na mírách zaleží, vozíček pak bude sloužit i několik let



I s hendikepem se žije spokojeně, Nikolass s vozíčkem na výstavě – kde byl dříve vítězem.

1.**1. Výška psa k vrcholu stehna**

Toto měření slouží k určení výšky vozíku.
Měříme od země po vrchol zadního stehna, v případě velkých plemen – leží pes na boku – nohu natáhneme tak, jako kdyby stál.

2. Délka od středu plece po vrchol stehna

Toto měření slouží k určení délky vozíku.
Měříme od vrcholu zadního stehna po střed plece. U velkých plemen jde snadno provést v leže.

3.**3. Šířka stehna**

Toto měření slouží k určení velikosti otvoru na nohy v zadním neoprenovém dílu.
Měříme od levé strany jednoho stehna k pravé straně téhož stehna nebo naopak. Neměříme obvod, ale šířku – metr neohýbáme.

4. Délka od středu plece pravé po střed plece levé

Toto měření slouží k určení délky předních popruhů, vedoucích přes hrudník zvířete.
Měříme od středu pravé plece po střed levé plece nebo naopak.

5.**5. Šířka pánve**

Toto měření slouží k určení šířky vozíku a šíře zadního neoprenového dílu.
Měříme v nejširším místě pánve od levé strany po pravou stranu nebo naopak. Měříme šířku – metr neohýbáme.

6. Šířka hrudníku

Toto měření slouží k určení šířky vozíku a velikosti předního neoprenového dílu.
Měříme v nejširším místě hrudníku od levé strany po pravou nebo naopak. Měříme šířku – metr neohýbáme.

2.**4.****6.**